



### Einfachste Handhabung:

- Amnicator ist einzeln verpackt und gebrauchsfertig.
- Schnelle und einfache Diagnose durch eindeutigen Farbumschlag.
- Ergebnisse nach 30 sec.
- Lagerung bei Raumtemperatur, sofort einsetzbar.
- 2 Jahre haltbar nach Herstellung.
- PPV = 63-75%; NPV = 80-93% \*

\* Contemporary Management of PROM; Reviews in Obstetrics & Gynecology Vol. 1, No. 1 2008


### Testdurchführung

- 1) Reinigung der Vulva und des Vaginalkanals
- 2) Während der sterilen Spekulumuntersuchung mit dem Amnicator-Tupfer eine Probe aus dem hinteren Scheidengewölbe nehmen, den Tupfer dabei drehen um genügend Flüssigkeit aufzunehmen; vor dem Herausziehen des Tupfers mit diesem kurz über die Ektozervix streichen.
- 3) Danach den Amnicator-Tupfer sofort herausziehen und den Farbumschlag beobachten.
- 4) Die Farbgebung des Tupfers mit der Farbskala vergleichen.

Bitte beachten: Antibiotika-Therapien oder vaginale Infektionen haben Einfluß auf den normalen vaginalen pH-Wert und dieses kann zu falsch positiven Resultaten führen.

### Bestellinformation:

**MWAM5 Karton mit 50 Testbestecke**

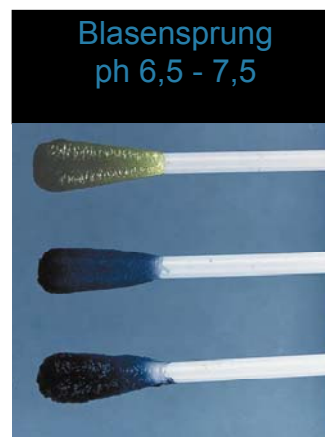

[www.amnicator.com](http://www.amnicator.com)

In Vertrieb von  
Check Diagnostics GmbH  
Dorfstraße 2 23847 Westerau  
Tel.: 04539 181616 Fax: 04539 181617  
E-Mail: [check@check-dx.de](mailto:check@check-dx.de)  
[www.check-dx.de](http://www.check-dx.de)



Stand: 02/2022